



ブデホル 吸入粉末剤30吸入「ニプロ」 吸入粉末剤60吸入「ニプロ」 を使用される患者さんへ

操作方法是裏面にあります。使用する前に裏面も必ずお読みください。

各 部 名 称

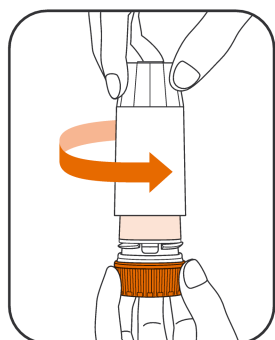

キャップを回してははずします。

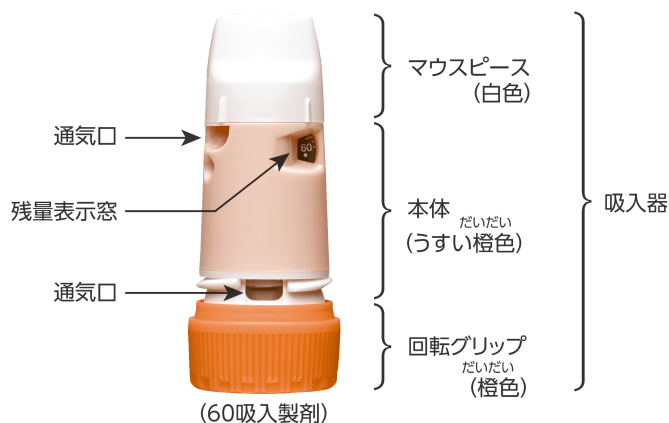

(60吸入製剤)




(30吸入製剤)

残量表示窓について

表示の仕組み

残量表示窓で大まかな残りの吸入回数を確認できます。(1目盛りあたり5回分)



橙色の回転グリップを「右へ回して左に戻す」操作を1回行うと、吸入回数の表示が少し回転して1吸入分のおくすりがセットされます。

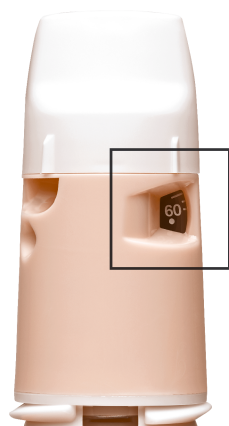

30吸入製剤

60吸入製剤

表示の進み方と交換時期(実際の見え方)


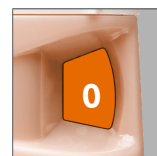
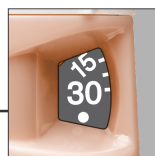


使用開始

「右へ回して左に戻す」操作を行うことで、表示が少し進みます。

使用回数を重ねていくと、徐々に赤い印が見えてきます。

残量表示窓の中央に「0」が表示され、それ以上進まなくなったら、使用をやめて新しい吸入器を使用してください。

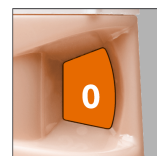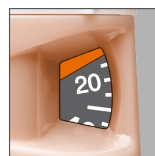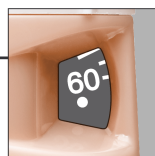

注 意 事 項

- 残量表示窓には下記のように表示されます。(1つきざみではありません。)
30吸入製剤：『30』→『15』→『0』
60吸入製剤：『60』→『40』→『20』→『0』
- 橙色の回転グリップは必要以上に回さないでください。必要以上に回転グリップを回転させると、吸入していなくても『0』が早く表示されます。

保管・手入れ・廃棄

- 使用後は必ずキャップを閉めて室温で保管してください。
- 白色のマウスピースは週に1～2回乾いた布で拭いてください。(水洗いはしないでください。)
- 吸入器は分解しないでください。(白いマウスピースは回すことができますが、取り外せない構造になっています。)
- 廃棄する際は各自治体の廃棄方法に従ってください。

※ 疑問点や質問等がある場合には医師または薬剤師に相談してください。

操作方法

未使用の吸入器を使用するときだけ、以下の操作を行ってください。

橙色の回転グリップを「カチッ」と4回音が鳴るまで左右に回します。

(左に回したときに「カチッ」と音が鳴ります。)


※ 4回目に左に回して「カチッ」と音が鳴れば準備完了です。

※ 橙色の回転グリップを回転させる操作は、片方の手で

うすい橙色の本体をまっすぐ立てるように持ち、

もう片方の手で回転グリップを回してください。

(その後①に進んでください)

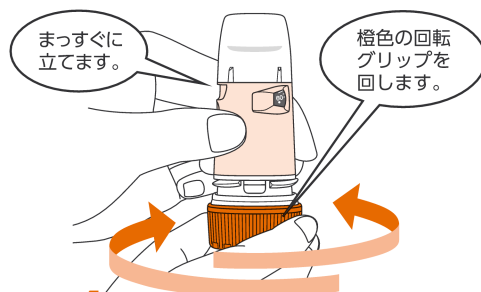


「カチッ」と4回音が鳴るまで左右に回します

おくすりを1吸入する方法

① 右へ回す


橙色の回転グリップを図の矢印の通り右方向へ回転させます。回転が止まるまでしっかり回してください。

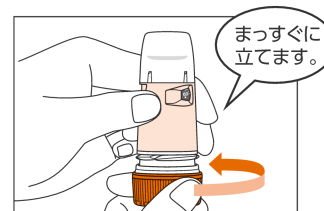

② 左に戻す

「カチッ」と音が鳴ります

橙色の回転グリップを図の矢印の通り左方向に回転させます。「カチッ」と音が鳴れば、おくすりがセットされた合図です。

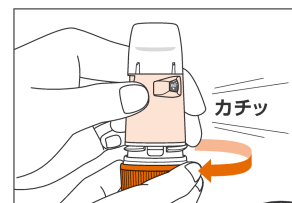

③ 息を吐いて、深く大きく吸い込む

息を充分吐いてから、白色のマウスピースをくわえ、息を深く大きく吸い込みます。

吸い込んだ後は、マウスピースから口を離して息を吐いてください。

※ 吸入するときに、うすい橙色の本体を握らないでください。

※ マウスピースに息を吹きかけないでください。

①～③の操作で1吸入です。

2吸入以上行う場合は、①～③の操作をくり返し行ってください。必要な吸入回数を終えたらキャップを閉めます。

使用後に必ずうがいをしてください。

(うがいが難しい場合は口の中をすすいでください。)



吸入についての注意事項

- ①～③の操作で1吸入できます。橙色の回転グリップを何度回転させても、おくすりは1吸入分しかセットされません。必要以上に回さないでください。
- 吸入するおくすりは刺激が少なく、ごくわずかな量です。吸った感じがなくても①～③の操作が正しく行われていれば、おくすりは吸入できています。
- 吸入器は横にして回さないでください。吸入器は立てて回してください。
- 吸入器本体を握らないでください。吸入するときは本体を握らず、橙色の回転グリップを持ってください。
- 医師に指示された吸入回数を必ず守って使用してください。
- 吸入できたかどうか不安な場合は、それ以上の操作や吸入は行わず、医師または薬剤師に相談してください。