

ブデホル吸入粉末剤「ニプロ」を使用されている方へ

ブデホル吸入粉末剤「ニプロ」用 吸入練習器

- ◆ オレンジ色の器具はブデホル吸入粉末剤の吸入を練習するための笛です。
- ◆ 薬剤は含まれていません。
- ◆ 正しく吸入すると笛の音がなりますので、音になるように大きく息を吸い込んでください。

【注意】

処方されたお薬（ブデホル吸入粉末剤「ニプロ」）を吸入しても笛の音はなりません。

吸入サポートアプリを使うと、「深く大きく吸い込んでいること」が確認できます。

吸入サポートアプリをご使用される場合は、右記のQRコードを読み取りインストールしてください。（iPhone/Android用）



ブデホル吸入粉末剤「ニプロ」用 吸入練習器の使い方

〈練習方法〉



大きく息を吐いた後、吸入口をくわえて、深く大きく吸い込む。
正しく吸入できていれば、「ポーッ」と音がなります。

* 使用後は吸入口をきれいな布等で拭いてください。

これは吸入練習器です。
お薬ではありません。

LOT.H01

